

PerfectClean

L'unique Dispositif Médical de nettoyage
et de déshumidification des aides auditives,
avec UV-C

Nouvelle version

+ rapide + efficace

Un an après la mise sur le marché de la PerfectClean et plus de 15.000 unités vendues à travers le monde, voici la nouvelle version de la PerfectClean.

Aujourd'hui la PerfectClean est encore plus fiable et simple d'utilisation.




Les principales améliorations




Durée compatible avec
l'utilisation d'un chargeur
pour aides auditives



Modification de la chambre
d'accueil des aides auditives
afin de garantir un meilleur
séchage

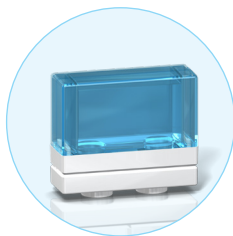

Nouvelle formule efficace
contre le cérumen et plus
hypoallergénique

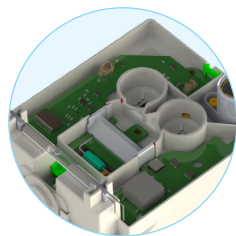


Carte électronique
waterproof.
Prévention des mauvaises
manipulations



Présentation



Élimination totale du cérumen et impuretés grâce au système breveté Power Vortex

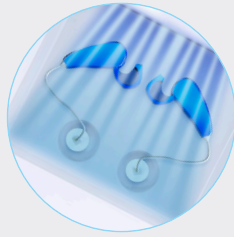

Lampe UV-C

- UV-C par onde courte (253.7nm)
- Aucun dommage sur les surfaces des aides auditives



Système de séchage breveté par air pulsé


- Régulation de la température à 45°C +/-3°C
- Ventilation contrôlée

Flux d'air homogène et optimisé

- Élimination de l'humidité




Une solution nettoyante qui dissout le cérumen. Hypoallergénique

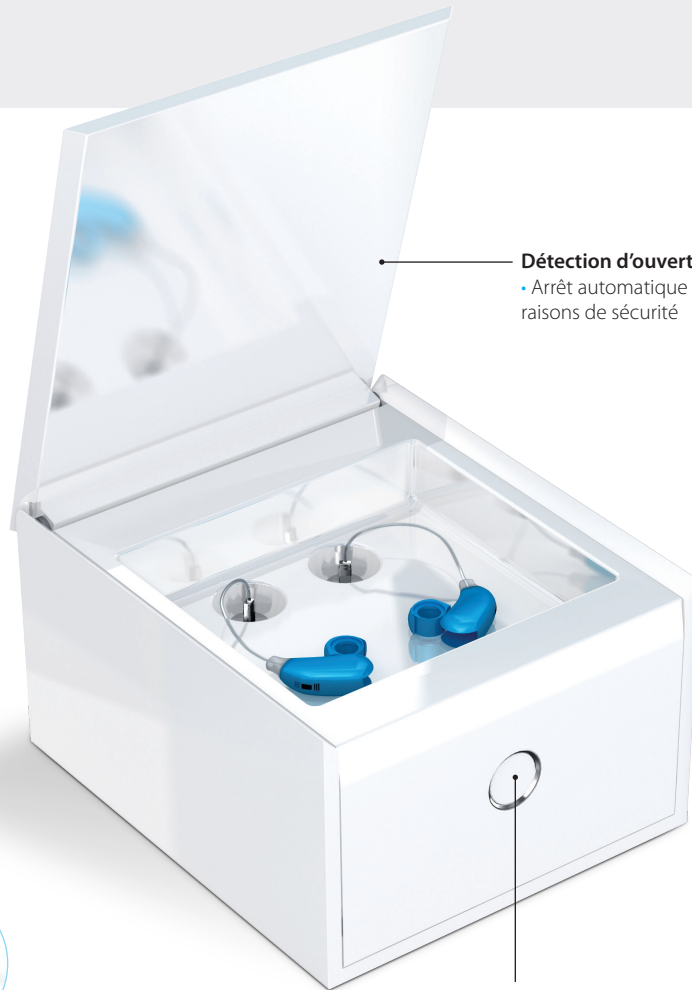


Détection d'ouverture du couvercle

- Arrêt automatique de la lampe UV-C pour des raisons de sécurité

Avant nettoyage

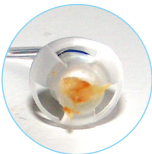

Après nettoyage

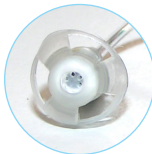

Voyant lumineux


- **Bleu** - clignotement lent > Marche
- **Bleu** - fixe > En veille
- **Bleu** - clignotement rapide > Recharger en solution
- **Rouge** - clignotement rapide > Défaut

Mode d'emploi

Remplissage


1

Retirez totalement la languette de la recharge.

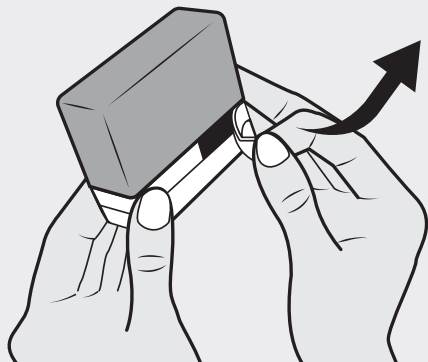


2

Positionnez la recharge tête en bas, à l'emplacement prévu dans la PerfectClean.

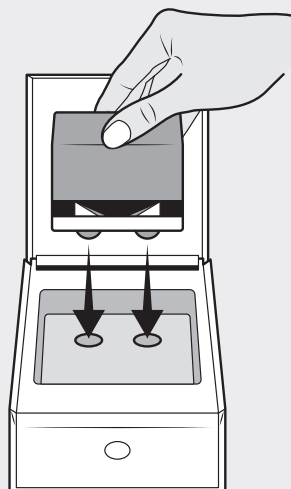

3

Appuyez progressivement et horizontalement sur la recharge jusqu'à la butée afin de percer les opercules. Attendez que la totalité du liquide se soit écoulée.

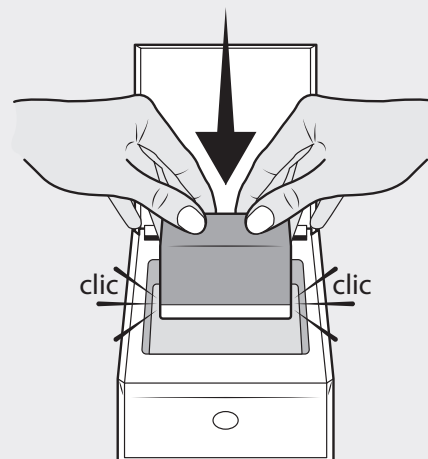

Une recharge permet de réaliser entre 40 et 50 cycles*, de 20 à 25 cycles* lorsque le réservoir est vide (première utilisation ou après vidange pour transport)



*Quantités données à titre indicatif. Ces données peuvent varier selon les appareils auditifs.

Mise en marche

1

Ouvrir le compartiment de pile (les piles peuvent rester dans leur logement), poser les appareils auditifs dans le boîtier en mettant les embouts dans les deux orifices prévus à cet effet. Fermer le capot.

La PerfectClean convient à tous les types d'aides auditives.

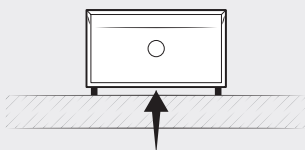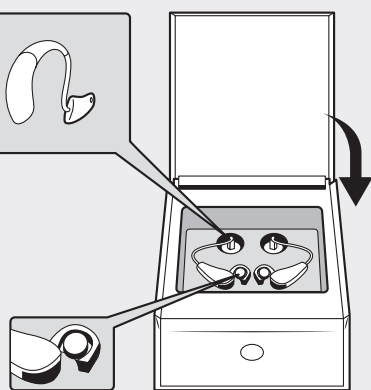

Poser la PerfectClean sur une surface lisse et plane. Ne pas obstruer l'entrée d'air sous la PerfectClean.

2

Appuyer une fois sur le bouton tactile pour lancer le cycle (le flash lumineux blanc indique la prise en compte de la demande). Le voyant bleu clignote lentement, il indique que le boîtier est en fonctionnement. Le cycle ne s'exécute que capot fermé. La PerfectClean s'arrête automatiquement à la fin du cycle d'entretien (1h). Le voyant s'éteint.



Au-delà des 30 secondes avant le lancement la led bleue se met en veille. Il faut alors ouvrir et fermer le capot à nouveau pour lancer le cycle en appuyant sur le bouton tactile.

La nouvelle PerfectClean est d'ores et déjà disponible, vous découvrirez sa présentation dans un coffret plus protecteur et mieux adapté au transport.



Détails intérieur
du coffret



Fourreau
personnalisable



PerfectClean